

ClearReader + Basic -Aktivere språk og stemmer

Start/ Pause-knapp



Tilbake-knapp

Fremover-knapp

For å gjøre ting enklere, bytt først språk til engelsk.

1. Trykk: «Start/ Pause»-knapp og «Fremover»-knapp samtidig.
2. Trykk: «Fremover»-knapp til du kommer til «Settings».
3. Trykk: «Start/ Pause»-knapp.
4. Trykk: «Fremover»-knapp til du kommer til «Voice».
5. Trykk: «Start/ Pause»-knapp.
6. Trykk: «Fremover»-knapp til du kommer til språket du ønsker å aktivere.
7. Trykk: «Start/ Pause»-knapp.
8. Trykk: «Fremover»-knapp til du kommer til ønsket stemme.
9. Trykk: «Start/ Pause»-knapp for å velge.
- 10: Trykk: «Start/ Pause»-knapp og «Fremover»-knapp samtidig gjentatte ganger til du kommer til «Trykk skann for å ta bilde».
- 11: Når de norske stemmene er lagt til må du etterpå velge en av dem. Trykk «Tilbake»-knapp samtidig som du vrir på hastighetshjulet for å velge norsk stemme.

NB! For mange språk finnes det flere stemmer, og for disse må du først aktivere språket og deretter en av stemmene.